

# SELAND CARE

## TRAJE TÉRMICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD



Es un traje térmico de neopreno, especialmente diseñado para poner y quitar con facilidad y que se adapta a cada individuo. Mantiene la temperatura corporal, protege de golpes y regula el equilibrio a una persona con movilidad reducida o a personas con discapacidad moderada, severa o total. Permite disfrutar de la sesión de hidroterapia con solo un acompañante o profesional.

**El tiempo que se tarda en ponerlo, puede ser entre tres y seis minutos, dependiendo del grado de discapacidad que tenga cada persona.**

**SIEMPRE VIGILADO POR UN ACOMPAÑANTE QUE LE PUEDA ASISTIR EN CASO DE NECESIDAD (evitar darse la vuelta)**

## TRAJE TÉRMICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

**Protección térmica para estar cuatro veces más tiempo en el agua, protección a la abrasión y a los golpes, con un sistema que regula el equilibrio con flotabilidad negativa o positiva según las necesidades.**

Las personas con discapacidad, son las mayores candidatas para utilizar este tipo de trajes:

- Cuando están en el agua su cuerpo se libera de esas ataduras físicas, que conlleva la parálisis y disfrutan de la ingravidez.
- El agua, es uno de los medios más adecuados para la rehabilitación y mantenimiento físico para personas con discapacidad. La utilización de un traje térmico es importantísimo, ya que no se mueven lo suficiente en el agua para generar calor y la temperatura les baja rápidamente. Con el neopreno conseguimos mantener el calor corporal más tiempo y pueden hacer los ejercicios de rehabilitación sin tener que suspenderlos enseguida, debido al temblor producido por el frío.
- El neopreno tiene gran protección contra todos los impactos y rozaduras sobre todo para las personas con discapacidad, que no controlan bien los movimientos de su cuerpo, por lo que son mucho más vulnerables a sufrir lesiones.
- El cuerpo se equilibra gracias a la capacidad de flotabilidad positiva del neopreno y la negativa de unos pesos repartidos individualmente, de manera que nos ayuda a mantener a la persona en la postura adecuada en el agua, para su rehabilitación.
- Además, lleva un collar flotante que mantiene la cabeza fuera del agua para los que lo necesitan, que se regula con los refuerzos interiores añadiendo o cambiando de posición.

Todas estas características, hacen que estas personas se liberen de su cuerpo, flotando en el agua, disfrutando del momento y ayudando tanto a los cuidadores, como a los profesionales de la rehabilitación, facilitándoles su trabajo en la piscina.

De esta manera, estas personas se pueden mantener fácilmente con el apoyo de una sola persona.



## COLOCACIÓN DEL TRAJE

Se considera un sistema de fácil colocación, ya que el traje se abre entero, quedando de una sola pieza. De esta manera se pone el traje sobre una superficie plana (camilla o mesa).

Se abren los velcros dejando la parte interna, que es la parte suave a la vista, para poder colocar a la persona tumbada encima.  
**(Foto 1)**



Se va cerrando y envolviendo a la persona: Se empieza por la parte del pecho, uniendo el velcro de los dos delanteros.  
**(Foto 2)**



Luego se cierran las piernas, empezando por los tobillos y subiendo por los muslos, hasta la ingle.  
**(Foto 3)**



Después se sigue por los brazos, empezando desde las muñecas hasta el cuello.  
**(Foto 4)**




El collar se une al traje con el velcro y unas trabillas que tiene el cuello del traje. También se regula cambiando o añadiendo foams donde se necesite.


### **CERRAR LOS VELCROS JUSTO DESPUES DE QUITAR EL TRAJE.**

El velcro puede dañar el interior del traje y las costuras.

# AJUSTE EN EL AGUA

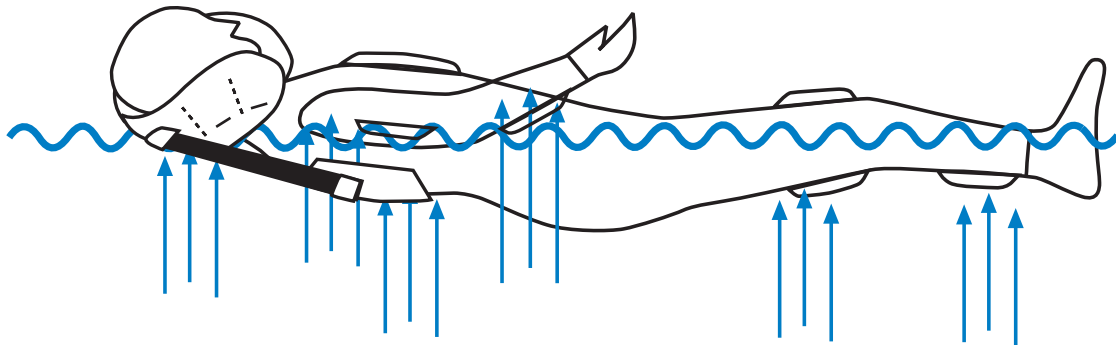


**FUERZA POSITIVA  
NEOPRENO - FOAM**

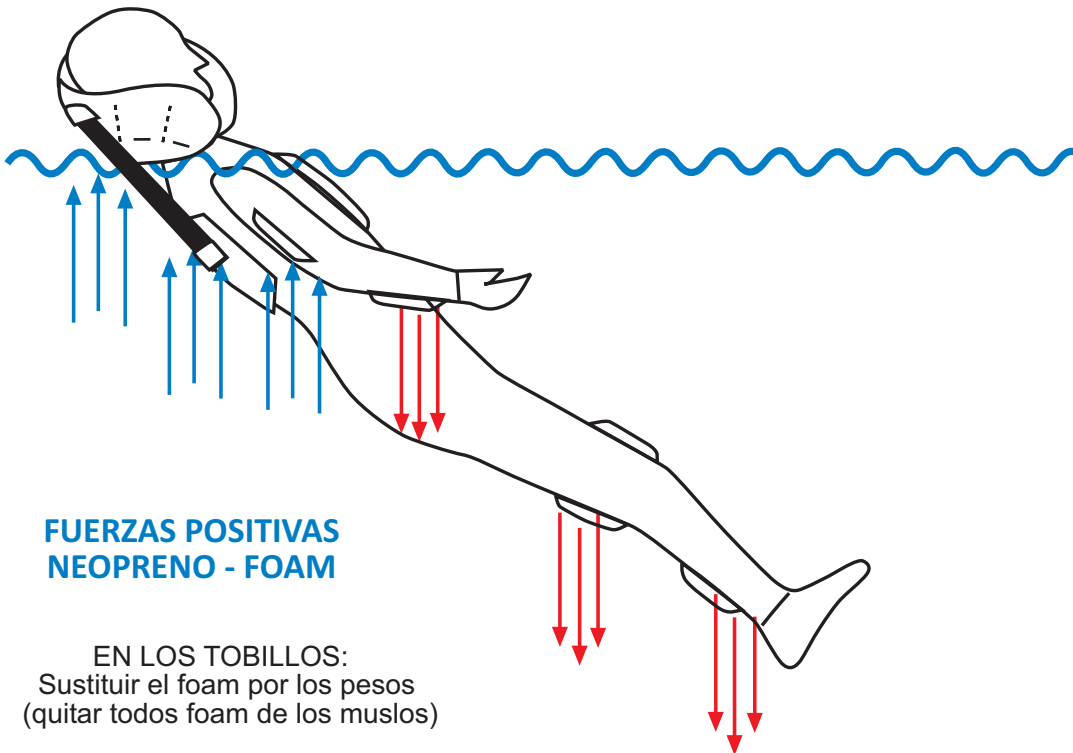

**FUERZAS POSITIVAS  
NEOPRENO - FOAM**

EN LOS TOBILLOS:  
Sustituir el foam por los pesos  
(quitar todos foam de los muslos)

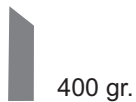

400 gr.

**FUERZA NEGATIVA  
PESO**



SELAND NEOPREN S. L.  
Antsonekoa kalea, 2 (Pol. Igeltzera. Naves 4-5)  
48610 Urduliz (Bizkaia)  
Tlf. (+34) 94 676 48 75 • [selandcare@seland.com](mailto:selandcare@seland.com)